



ENURAD® 400 – SÄNGVÄTARALARM

Handledning för mottagningen



enurad.se

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER:

- 1 Väckarklocka
- 1 Nätadapter
- 1 Fuktavkännare
- 1 Användarmanual
- 5 Trosskydd

PROVNING AV UTRUSTNINGEN

- Sätt nätadapterns runda sladdkontakt i väckarklockan.
- Sätt adaptorn i ett vägguttag.
- Titta på sekundvisaren för att se att klockan fungerar. Om inte, kontrollera att batteriet sitter i riktigt (OBS! batteriet behövs även för att larmets ringsignal skall fungera).
- Släpp upp knappen på klockan, klockan ringer två gånger som funktionskontroll.
- Fukta ett finger med saliv och tryck fingret mot fuktavkännarens metallsida. Detta aktiverar fuktavkännaren som sänder en signal till klockan. Klockan skall nu börja ringa. Den fortsätter tills knappen på klockan trycks ned.
- Torka av fuktavkännaren lite lätt.

PROVA HUR LÅNGT IFRÅN KLOCKAN FUKTAVKÄNNAREN FUNGERAR

- Ta fuktavkännaren och gå några meter ifrån klockan.
- Fukta avkännaren. Börjar klockan ringa direkt kan du öka avståndet. Ringer klockan inte, gå med snabba steg mot klockan tills den börjar ringa.

Tänk på att fuktavkännaren bara sänder under ca 3 sek. Ringer den inte vid första försöket, gå lite närmare och försök igen. Torka av fuktavkännaren mellan varje försök. Normalt skall väckarklockan placeras så långt från sängen att patienten inte kan nå den utan att gå ur sängen.

När avkännaren blir fuktig aktiveras den under ca 3 sekunder. Har man fuktat den och sedan torkat av den efter provet, kan man starta den på nytt efter ca 10 till 20 sekunder.

Är den däremot fuktig, så har den slutat sända efter 3 sekunder och går först att starta igen efter att den har varit torr i minst 5 sekunder.

FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR PATIENT/FÖRÄLDER

- Öppna kartongen och visa de olika delarna i kartongen. Ta ut väckarklockan och nätadaptern. Visa hur man kopplar ihop dem. Sätt nätadaptern i ett vägguttag.
- Visa att klockan fungera som en vanlig klocka och att man ställer in tiden med ställskruven på baksidan. Förklara att väckningsfunktionen har kopplats bort så att den inte larmar för fel sak.
- Knappen på översidan är till för att sätta på och stänga av larmet. Uppsläppt knapp innebär att larmet är "på" och nedtryckt betyder att larmet är avstängt.
- Släpp upp knappen. Klockan ringer två gånger som kontroll.
- Förklara att det finns en liten radiosändare i fuktavkännaren och att den sätts i gång så snart det blir fuktigt mellan metallytorna.
- Låt patienten fukta ett finger och peka med den mot metallsidan av fuktavkännaren (förklara att detsamma händer när man kissar på fuktavkännaren). Klockan skall nu börja ringa.
- Tryck ned knappen på klockan så att den slutar ringa.
- Ta fram ett trosskydd och förklara hur fuktavkännaren placeras i den och där-efter klistras fast i ett par tätt åtsittande trosor/kalsonger. Visa att sensorn skall sitta så nära urinöppningen som möjligt. Alternativt, visa hur man placerar fuktavkännaren direkt i ett par kalsonger genom att klippa ett litet hål på insidan. Avkännaren hamnar då mellan de två tyglagren på framsidan.
- Tala om att väckarklockan skall stå så långt ifrån sängen att patienten måste gå upp för att stänga av larmet.

Och till sist:

Den viktigaste delen av behandlingen är att patienten sköter detta alldeles själv.

SÅHÄR PLACERAS SENSORN I ETT TROSSKYDD



För att göra öppningen drar man isär trosskyddet genom att greppa med 2 fingrar på bak- och framsidan. Sedan klipper man ett litet snitt ca 2,5 cm på framsidan. Stoppa försiktigt in ett finger för att skapa plats. Sensorn skall placeras med metallytan mot kroppen.

SÅHÄR PLACERAS SENSORN DIREKT I KALSONGEN

Klipp ett lite snitt, ca 2,5 cm, på insidan av kalsongen och placera sensorn med metallytan mot kroppen.



NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT KOMMA IHÅG!

- Radiovågor som fuktavkännaren skickar i väg kan störas, särskilt av datorer, trådlösa termometrar, hörlurar och inbrottslarm samt mobiltelefoner, men även av lampor och batteridrivna leksaker.
- Fuktavkännaren skall inte utsättas för länge för urin, eftersom det är mycket aggressivt mot metall. Fuktavkännaren skall sköljas av med ljummet vatten och lite tvål. Borsta gärna varsamt med en mjuk tandborste och torka den torr.
- Om fuktavkännaren har suttit kvar i kalsongerna och åkt med in i tvätten är den förstörd. Den tål ej att tvättas i disk- eller tvättmaskin.
- Gör bara ett snitt som öppning i trosskyddet. Det har hänt några gånger att barnen har gått på WC, dragit ner byxorna och tappat fuktavkännaren i toalettstolen och spolat ner den.
- Utrustningen, som är till låns, ska behandlas varsamt.
- Vi rekommenderar av hygieniska skäl, en fuktavkännare per patient.

OM UTRUSTNINGEN INTE FUNGERAR:

A) KONTROLLERA BATTERIET I VÄCKARKLOCKAN.

B) KONTROLLERA FUKTAVKÄNNARENS METALLYTA.

Det är viktigt att metallytan på fuktavkännaren rengörs efter varje användning.



TROSSKYDD

Vi rekommenderar dessa trosskydd som finns att köpa i dagligvaruhandeln. Gå alltid in på enurad.se för att få den senaste informationen om vilket trosskydd som fungerar bäst.

Produkten är CE-märkt och godkänd enligt europeisk standard och registrerad av Läkemedelsverket, nummer 344-159623316.

Som tillverkare av elektronik åtar vi oss att ta tillbaka den av oss tillverkade utrustningen efter användning. Så, värna om miljön, sänd tillbaka använda fuktavkännare till oss, så tar vi hand om destruktionsen.

