



ENURAD®500 – SÄNGVÄTARLARM

Handledning för mottagningen



enurad.se

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER:

- 1 Mottagare
- 1 Nätadapter
- 1 Fuktavkännare (även kallad sensor)
- 1 Användarmanual
- 5 Trosskydd




Mottagare



Fuktavkännare (sensor)

PROVNING AV UTRUSTNINGEN

- Sätt nätadapterns runda sladdkontakt i mottagaren.
- Sätt adaptern i ett vägguttag.
- Testa mottagaren genom att trycka på **ON** (2 signaler ska låta). Grön diod tänds.
- Tryck sedan på **OFF**
- Ljudvolymen på larmet kan ställas i 3 lägen genom att trycka på volymknappen  1-3 ggr.
- Fukta ett finger med saliv och tryck fingret mot fuktavkännarens metallsida. Detta aktiverar fuktavkännaren som sänder en signal till mottagaren. Mottagaren skall nu börja larma. Den fortsätter tills knappen **OFF** trycks ned.
- Torka av fuktavkännaren lite lätt.

PROVA HUR LÅNGT IFRÅN MOTTAGAREN FUKTAVKÄNNAREN FUNGERAR


- Ta fuktavkännaren och gå några meter ifrån mottagaren.
- Fukta avkännaren. Börjar mottagaren larma direkt kan du öka avståndet. Larmar den inte, gå med snabba steg mot mottagaren tills den börjar larma.

Tänk på att fuktavkännaren bara sänder under ca 3 sek. Ringer den inte vid första försöket, gå lite närmare och försök igen. Torka av fuktavkännaren mellan varje försök. Normalt skall mottagaren placeras så långt från sängen att patienten inte kan nå den utan att gå ur sängen.

När avkännaren blir fuktig aktiveras den under ca 3 sekunder. Har man fuktat den och sedan torkat av den efter provet, kan man starta den på nytt efter ca 10 till 20 sekunder.

Är den däremot fuktig, så har den slutat sända efter 3 sekunder och går först att starta igen efter att den har varit torr i minst 5 sekunder.


FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR PATIENT/FÖRÄLDER

- Öppna kartongen och visa de olika delarna. Ta ut mottagaren och nätadaptern. Visa hur man kopplar ihop dem. Sätt nätadaptern i ett vägguttag.
- Visa funktionerna på mottagaren.
- Testa mottagaren genom att trycka på **ON** (2 signaler ska låta). Grön diod tänds. Tryck sedan på **OFF**. Tala om att ljudvolymen på larmet kan ställas i 3 lägen genom att trycka på volymknappen  1-3 ggr.
- Förklara att det finns en liten radiosändare i fuktavkännaren och att den sätts i gång så snart det blir fuktigt mellan metallytorna.
- Låt patienten fukta ett finger och peka med den mot metallsidan av fuktavkännaren (förklara att detsamma händer när man kissar på fuktavkännaren). Mottagaren skall nu börja larma.
- Tryck på knappen **OFF** så att den slutar larma.
- Ta fram ett trosskydd och förklara hur fuktavkännaren placeras i den och där-efter klistras fast i ett par tätt åtsittande trosor/kalsonger. Visa att sensorn skall sitta så nära urinöppningen som möjligt. Alternativt, visa hur man placerar fuktavkännaren direkt i ett par kalsonger genom att klippa ett litet hål på insidan. Avkännaren hamnar då mellan de två tyglagren på framsidan. Det är viktigt att trycka in sensorn i trosskyddet/kalsongen, så att den inte har någon hudkontakt.
- Tala om att mottagaren skall stå så långt ifrån sängen att patienten måste gå upp för att stänga av larmet.

Och till sist:

Den viktigaste delen av behandlingen är att patienten sköter detta alldeles själv.

SÅHÄR PLACERAS SENSORN I ETT TROSSKYDD

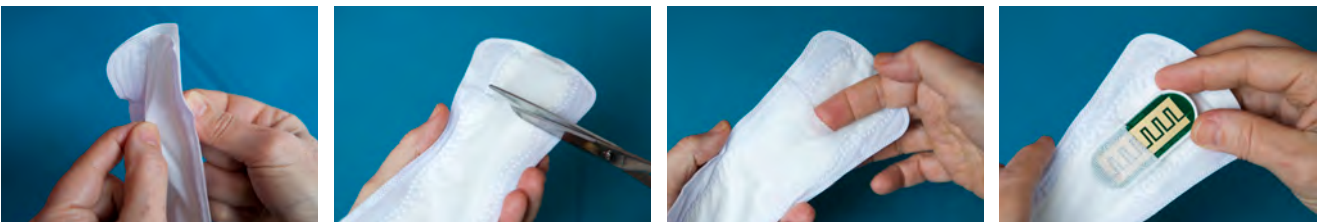

För att göra öppningen drar man isär trosskyddet genom att greppa med 2 fingrar på bak- och framsidan. Sedan klipper man ett litet snitt ca 2,5 cm på framsidan. Stoppa försiktigt in ett finger för att skapa plats. Sensorn skall placeras med metallytan mot kroppen. Tryck in sensorn så att den inte har någon direktkontakt med huden.

SÅHÄR PLACERAS SENSORN DIREKT I KALSONGEN

Klipp ett lite snitt, ca 2,5 cm, på insidan av kalsongen och placera sensorn med metallytan mot kroppen. Tryck ner sensorn så att den inte har någon direktkontakt med huden.



NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT KOMMA IHÅG!

- Radiovågor som fuktavkännaren skickar i väg kan störas, särskilt av datorer, trådlösa termometrar, hörlurar och inbrottslarm samt mobiltelefoner, men även av lampor och batteridrivna leksaker.
- Fuktavkännaren skall inte utsättas för länge för urin, eftersom det är mycket aggressivt mot metall. Fuktavkännaren skall sköljas av med ljummet vatten och lite tvål. Borsta gärna varsamt med en mjuk tandborste och torka den torr.
- Om fuktavkännaren har suttit kvar i kalsongerna och åkt med in i tvätten är den förstörd. Den tål ej att tvättas i disk- eller tvättmaskin.
- Gör bara ett snitt som öppning i trosskyddet. Det har hänt några gånger att barnen har gått på WC, dragit ner byxorna och tappat fuktavkännaren i toalettstolen och spolat ner den.
- Utrustningen, som är till låns, ska behandlas varsamt.
- Vi rekommenderar av hygieniska skäl, en fuktavkännare per patient.

OM UTRUSTNINGEN INTE FUNGERAR:

A) KONTROLLERA ATT MOTTAGAREN ÄR PÅSLAGEN.

B) KONTROLLERA FUKTAVKÄNNARENS METALLYTA.

Det är viktigt att metallytan på fuktavkännaren rengörs efter varje användning.



TROSSKYDD

Vi rekommenderar dessa trosskydd som finns att köpa i dagligvaruhandeln. Gå alltid in på enurad.se för att få den senaste informationen om vilket trosskydd som fungerar bäst.

Produkten är CE-märkt och godkänd enligt europeisk standard och registrerad av Läkemedelsverket.

För teknisk information se "Instruktion och manual Enurad®500".



ENURAD® AB, Box 162, 443 24 Lerum
Tel: 0303 584 00
Epost: info@enurad.se
enurad.se

